

IMPRESSION MATERIAL

# Panasil




شرکت تهران اتکال  
TEHRAN ETEKAL CO.

# A-Silicon

Precise, even in extreme situation

بسیار دقیق، حتی در سخت ترین شرایط

- ✓ مواد قالبگیری A-silicon بر پایه پلی ونیل سیلوکزان
- ✓ آبدوست بدون ایجاد تداخل عملکرد در مواجهه شدن با رطوبت دهان
- ✓ صرفه جویی در زمان که مورد رضایت بیمار و پزشک است.
- ✓ نفوذ کاملا یکتواخت در شیارها و ثبت دقیق جزئیات در لبه ها
- ✓ قوام بسیار مناسب در واش ها و عدم ریزش مواد حتی در نوع Very Low Viscosity
- ✓ عدم تغییر حجم تا ۲۱ روز (ثبات ابعادی)
- ✓ اختلاف رنگی قابل تشخیص در ترکیب ها (قالبگیری های دو مرحله و تک مرحله)
- ✓ خاصیت الاستیک بسیار عالی و غیر چسبنده و کاملا انعطاف پذیر
- ✓ دقت بسیار بالا و حداقل زمان مورد نیاز جهت ست شدن در دهان بیمار

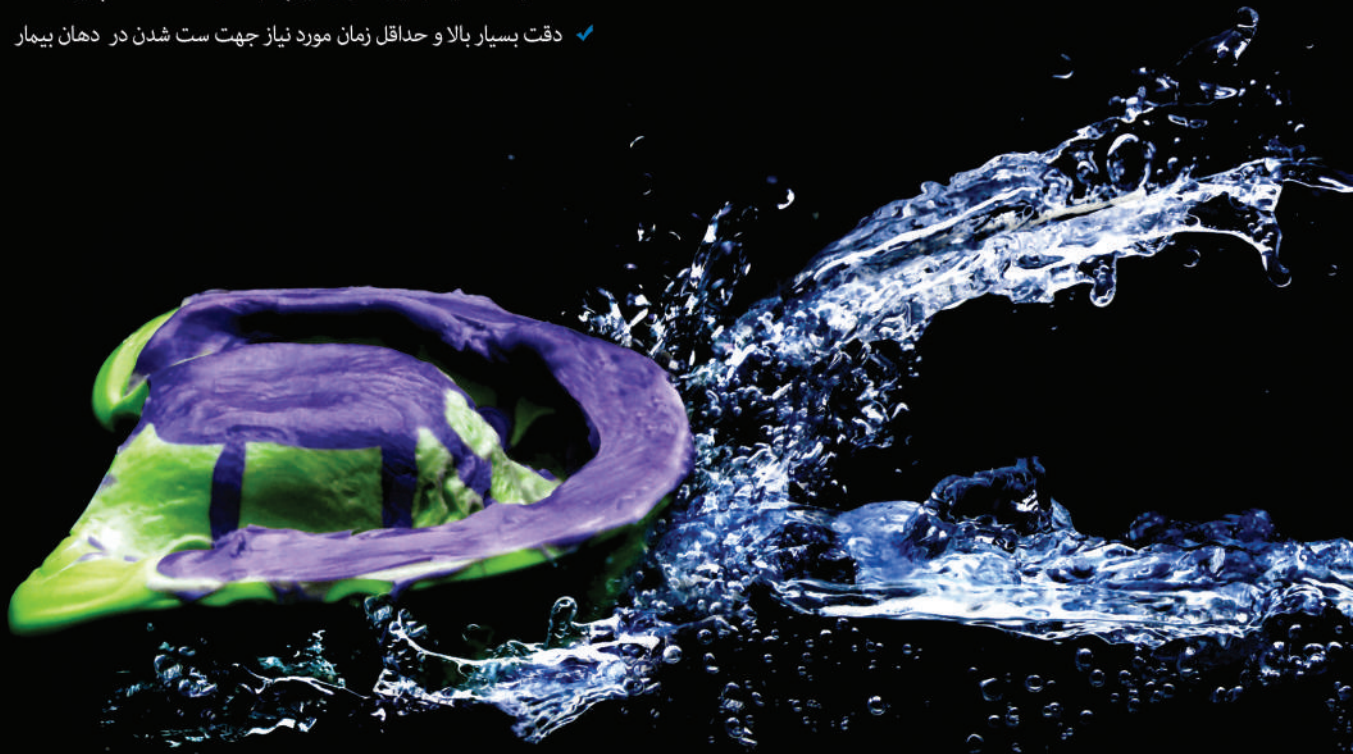

# Panasil® Putty Soft



- ✓ پوتی Soft
- ✓ قالبگیری دقیق با حداقل زمان
- ✓ مناسب جهت استفاده به همراه Regular و Light
- ✓ قابل استفاده در قالبگیری های یک و دو مرحله ای ( ترجیح بیشتر برای یک مرحله ای)
- ✓ موارد استفاده: پروتز ثابت و ایمپلنت



درصد تغییر ابعاد خطی	ضریب سختی (Shore)	Total Setting Time	Intraoral Setting Time در ۳۵°C	Working Time در ۲۳°C	نسبت اختلاط	
-۰,۲۰	A 60	۴ دقیقه	۲ دقیقه	۲ دقیقه	۱:۱	
بو و طعم	رنگ	نحوه میکس	نسبت اختلاط و حجم ماده در هر کارتریج	ثبات (Consistency)	ISO 4823	نام محصول
طبیعی	زرد	دستی، یک پیمانه از (۱۲,۳ ml) Hardener و Base	۱:۱ قوطی ۹۰۰ ml	۲۴	نوع صفر پوتی	پوتی Soft

# Panasil® Putty Fast




- ✓ پوتی Hard
- ✓ قالبگیری دقیق و سریع
- ✓ بسیار مناسب جهت قالبگیری دو مرحله ای همراه با واش X-Light
- ✓ موارد استفاده:
- ✓ انواع قالبگیری پروتز ثابت
- ✓ مدت زمان ست شدن داخل دهان بیمار تنها ۲ دقیقه می باشد.



درصد تغییر ابعاد خطی	ضریب سختی (Shore)	Total Setting Time	Intraoral Setting Time در ۳۵°C	Working Time در ۲۳°C	نسبت اختلاط	
-۰,۲۰	A 66	۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه	۲ دقیقه	۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه	۱:۱	
بو و طعم	رنگ	نحوه میکس	نسبت اختلاط و حجم ماده در هر کارتریج	ثبات (Consistency)	ISO 4823	نام محصول
طبیعی	زرد اکرایلی	دستی، یک پیمانه از (۱۲,۳ ml) Hardener و Base	۱:۱ قوطی ۹۰۰ ml	۲۴	نوع صفر پوتی	پوتی Fast

# Panasil® contact X-Light

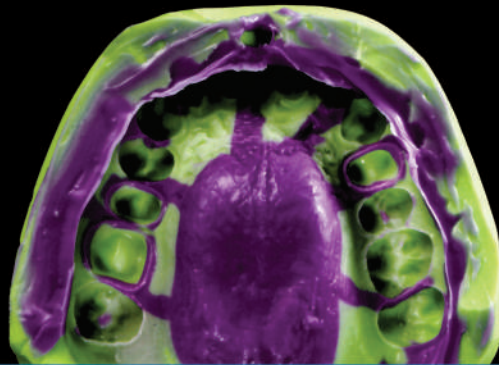


- ✓ واژ Very Low Viscosity
- ✓ کاملاً آبدوست با بهترین عملکرد در محیط مرطوب دهان
- ✓ تکنیک پیشنهادی: قالبگیری یک مرحله و دو مرحله ای (به خصوص دو مرحله ای)
- ✓ موارد استفاده: قالبگیری پروتز ثابت
- ✓ دقت فوق العاده بالا و عدم ایجاد تداخل عملکرد در حضور رطوبت دهان
- ✓ مدت زمان ست شدن داخل دهان بیمار ۲:۳۰ دقیقه



درصد تغییر ابعاد خطی	ضریب سختی (Shore)	Total Setting Time	Intraoral Setting Time در ۳۵°C	Working Time در ۳۵°C	Working Time در ۲۳°C	نسبت اختلاط	نام محصول
-۰,۲۰	A 46	۴ دقیقه	۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه	۱ دقیقه	۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه	۱:۱	X-Light
-۰,۲۰	A 46	۳ دقیقه	۲ دقیقه	۳۰ ثانیه	۱ دقیقه	۱:۱	X-Light Fast
بو و طعم	رنگ	ابزار مورد نیاز	نحوه میکس	نسبت اختلاط و حجم ماده در هر کارتریج	ثبات (Consistency)	ISO 4823	نام محصول
طبیعی	بنفش	نوک مخلوط کن زرد ۴,۲ mm	گان ۴ ۲:۱ / ۱:۱	۱:۱ کارتریج ۵۰ ml	۴۴	نوع ۳، Light Body	X-Light X-Light Fast

# Panasil® initial contact Light

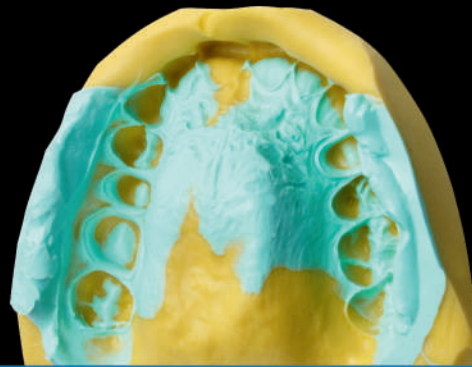

- ✓ واشر Low Viscosity جهت استفاده با انواع پوتی
- ✓ آبدوستی بسیار عالی و غلبه بر محیط مرطوب دهان
- ✓ تکنیک قالبگیری پیشنهادی: قالبگیری یک (پوتی و واشر همزمان) و دو مرحله ای
- ✓ موارد استفاده: انواع قالبگیری پروتز ثابت و بخصوص ایمپلنت



نام محصول	نسبت اختلاط	Working Time در ۳۳°C	Working Time در ۳۵°C	Intraoral Setting Time در ۳۵°C	Total Setting Time	ضریب سختی (Shore)	درصد تغییر ابعاد خطی
Light	۱:۱	۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه	۱ دقیقه	۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه	۴ دقیقه	A 46	-۰,۲۰
Light Fast	۱:۱	۱ دقیقه	۳۰ ثانیه	۲ دقیقه	۳ دقیقه	A 46	-۰,۲۰
نام محصول	ISO 4823	ثبات (Consistency)	نسبت اختلاط و حجم ماده در هر کارتریج	نحوه میکس	ابزار مورد نیاز	رنگ	بو و طعم
Light	نوع ۳، Light Body	۴۱	۱:۱ کارتریج ۵۰ ml	گان ۴ ۲:۱ / ۱:۱	نوک مخلوط کن زرد ۴,۲ mm	سبز	طبیعی
Light Fast							

# Adhesives



Panasil Adhesive ✓

✓ چسب مواد قالبگیری A-silicone جهت چسبیدن به فلز و اکریلیک

✓ استفاده آسان با براش

✓ زمان کوتاه جهت خشک شدن



# Panasil

## مواد قالبگیری A-Silicon



شرکت تهران اتکال

[www.tehranettekcal.com](http://www.tehranettekcal.com)

۰۲۱-۸۷۷۶۴

تهران، خیابان مطهری  
خیابان میر عماد، کوچه  
سیزدهم، پلاک ۱۲، واحد ۳



tehranettekcal

آدرس دفتر فروش: خیابان شهید بهشتی، نرسیده به اتوبان مدرس، ساختمان کلاسیک،  
پلاک ۲۵۱، طبقه ۱، واحد شرقی

نمایندگی های فروش:

۰۲۱-۶۶۴۲۰۱۱۹  
۰۳۱-۳۶۶۳۳۹۳۹  
۰۴۱-۳۳۳۶۹۴۴۴  
۰۶۱-۳۲۲۱۴۶۲۲  
۰۳۵-۳۷۲۴۳۹۴۶  
۰۷۶-۳۲۲۵۱۰۶۰

آقای جواهر ساز  
آقای خرم  
آقای نصیری  
آقای زرگرحسینی  
آقای دهقانی  
آقای عرب پور

تهران: فروشگاه گنجینه  
اصفهان: شرکت سایا  
تبریز: کالای کالج  
اهواز: کالای دندانپزشکی نوید  
یزد: منصف طب  
بندرعباس: منصف طب